



Saurer Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

## thermosept® SKS

### Unser Plus

- verhindert den Aufbau von Kalkbelägen
- unterstützt eine rückstandsfreie Abtrocknung des Spülgutes
- schaumfrei, enthält keine Tenside
- besonders umweltschonend
- hohe Materialverträglichkeit bei Edelstahl und diversen Kunststoffen

### Anwendungsgebiete

thermosept® SKS ist geeignet für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen. thermosept® SKS verfügt über spezielle Enthärterkomponenten zur Abbindung der Wasserhärte und sorgt für eine fleckenfreie Abtrocknung des Spülgutes. Das Produkt ist schaumfrei und bei allen Wasserhärten verwendbar.

### Anwendungshinweise

Dosierung:

0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 ml/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen. Sollte eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, empfiehlt es sich, vor Einsatz von thermosept® SKS eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit thermosept® NKZ oder thermosept® NKP). thermosept® SKS verhindert auch bei hoher Wasserhärte Kalkablagerungen im Verdampfer.



## Produktdaten

Zusammensetzung:

Härtestabilisator, Korrosionsinhibitoren, organische Säuren.

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,08 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C
Form	flüssig
pH	ca. 1,3 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept SKS SOKA 5 kg KA	1/Kanister	145803
thermosept SKS 5 kg KA	1/Kanister	145806

## Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen: Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)