



Klarspülkomponente für die maschinelle
Aufbereitung von Medizinprodukten ph-neutral

thermosept® BSK

Unser Plus

- sehr gute Benetzungseigenschaften für eine rückstandsfreie Abtrocknung
- materialschonend und vielfältig verwendbar
- verwendbar in Reinigungs-Desinfektionsgeräten, Betten- und Containerwaschanlagen
- pH-neutral

Anwendungsgebiete

thermosept® BSK ist ein pH-neutraler Klarspüler mit sehr guter Materialverträglichkeit zur Trocknungsunterstützung bei der maschinellen Aufbereitung von Medizinprodukten. Das Produkt kann auch nach dem Einsatz von thermosept® NDR für die chemothermische Aufbereitung von Containern inkl. Eloxalcontainern, Bettgestellen, Nacht- und OP-Tischen zum Einsatz kommen. thermosept® BSK kann im letzten Spülgang der maschinellen Aufbereitung in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Taktbandanlagen, Betten- und Containerwaschanlagen verwendet werden.

Anwendungshinweise

Dosierung für die chemothermische Aufbereitung in Betten- und Containerwaschanlagen:

0,1 - 0,2 %, (d.h. 1 - 2 ml/l Wasser).

Dosierung als Klarspüler für die thermische Aufbereitung von Medizinprodukten im RDG:

0,01 - 0,03 %, (d.h. 0,1 - 0,3 ml/l Wasser).

Bei der chemothermischen Aufbereitung in Betten- und Containerwaschanlagen wird empfohlen, das Produkt in Kombination mit der Reinigungs- und Desinfektionskomponente thermosept® NDR zu verwenden. Die Produkte thermosept® NDR und thermosept® BSK sind optimal aufeinander abgestimmt.



Produktdaten

Zusammensetzung:

15 - 30 % nichtionische Tenside, Lösungsvermittler,
Korrosionsinhibitor, pH-Regulator.

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	37 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 7 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Besondere Hinweise

Bitte beachten Sie stets die Empfehlungen der Geräte- und
Instrumentenhersteller.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept BSK 5 kg KA	1/Kanister	144906
thermosept BSK -D- 20 l KA	1/Kanister	144907
thermosept BSK -D- 200 kg FA	1/Fass	144904
thermosept BSK Drumt. 200 l FA	1/Fass	70001159

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 20 + 25 l	135901
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810

Verwandte Produkte

- thermosept® NDR

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter
www.schuelke.com. Für individuelle Fragen: Customer Sales
Service Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-
Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com